



PL

Airway Medix Oral Care

INSTRUKCJE OBSŁUGI

1.1. ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze instrukcje są przeznaczone do użytku z następującymi produktami:

Szczoteczka B- Care #32200 Pipeta 4 ml #PE

Przed obsługą SZCZOTECZKI B-CARE należy przeczytać niniejsze instrukcje i zachować je do późniejszego zastosowania.

1.2. WAŻNE

- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Należy stosować niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszych instrukcjach. Nie stosować akcesoriów niezalecanych przez producenta.


1.3. ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- B-Care jest szczoteczką przeznaczoną do utrzymania dobrej higieny jamy ustnej, w tym usuwania płytki nazębnej. Produkt zawiera szczoteczkę i dwie pipety do nabierania płynów.

1.4. UWAGA



- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Obsługiwać i przechowywać prawidłowo. NIE demontować produktu.
- NIE stosować, jeśli opakowanie zostało uszkodzone.
- Urządzenie można stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Niesterylne. NIE sterylizować ani nie autoklawować niniejszego produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jakiegokolwiek części wykazują oznaki uszkodzenia. Może to spowodować obrażenia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

2. OPIS

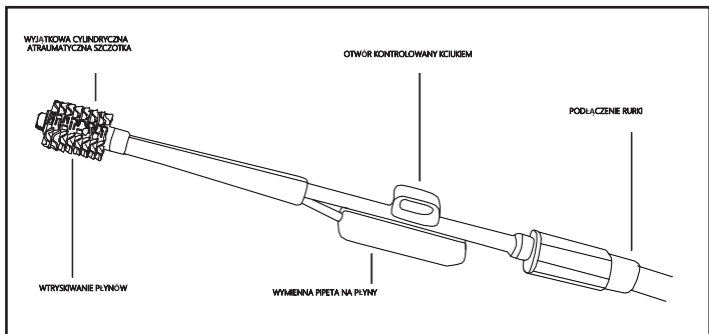


3. INSTRUKCJE OBSŁUGI B-CARE

- 3.1. Włożyć pipetę, aby pobrać płyny czyszczące [Rysunek 1].
- 3.2. Podłączyć pipetę do szczoteczki [Rysunek 2].

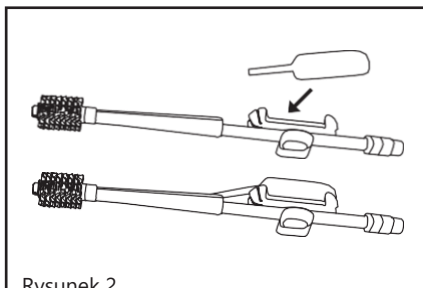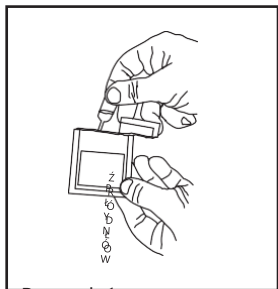

3.3. Trzymać szczoteczkę, umieszczając kciuk na otworze kontrolowanym kciukiem, a palec na pipecie. Zastosować płyny, delikatnie naciskając na pipetę [Rysunek 3].

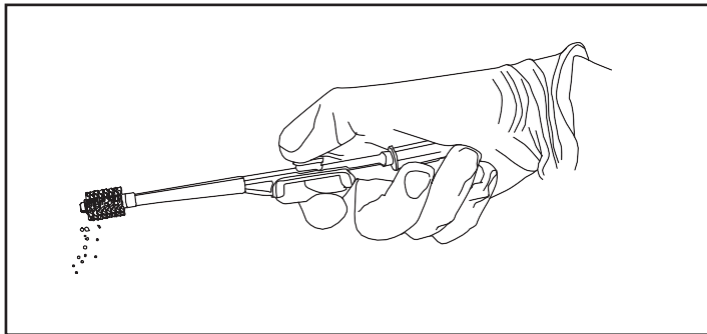

4. GUARANTEE

Udzielamy 2-letniej gwarancji na produkt, począwszy od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub wykonawczych, naprawiając lub wymieniając kompletne urządzenie według własnego uznania.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnego zużycia lub użytkowania, wad, które mają znikomy wpływ na wartość lub działanie urządzenia. Gwarancja traci ważność, jeśli naprawy są wykonywane przez osoby nieuprawnione i nie są używane oryginalne części Biovo Technologies. Aby skorzystać z serwisu w okresie gwarancyjnym, należy przekazać lub przesłać kompletne urządzenie przedstawicielowi handlowemu.

Wyprodukowano dla:

Airway Medix S.A.

ul. Gen. Józefa Zajęczka 11/14, 01-510

Warszawa, Polska **Tel:** +48 22 408 44 80 |

E-mail: info@airwaymedix.pl *Złożono i
zapakowano w Wielkiej Brytanii*



002-06-LAB Rev.00