

biovo technologies

Airway Medix Oral Care

إرشادات الاستخدام

١-١ إرشادات الاستخدام

فيما يلي إرشادات الاستخدام الخاصة بالمنتج: قبل استخدام فرشاة الأسنان (B-CARE) ينبغي لك قراءة هذه التعليمات والاحتفاظ بدليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل.

١-٢ تعليمات مهمة

- هذا المنتج غير مُخصص للاستخدام من قِبَل الأطفال.
- يجب استخدام المنتج حسب الاستخدامات المحددة له والمنصوص عليها في هذا الدليل الإرشادي. تجنب استخدام أي ملحقات غير مُوصى بها من قِبَل جهة التصنيع.

١-٣ استخدامات المنتج

- هذا المنتج غير مُخصص للاستخدام من قِبَل الأطفال.
- إن فرشاة (B-Care) هي فرشاة أسنان الغرض منها الحفاظ على صحة الفم، بالإضافة إلى إزالة الترسبات الجيرية على الأسنان. يتضمن هذا المنتج فرشاة أسنان واثنتين من الماصّات لتحميل السوائل.

١-٤ تحذير


- هذا المنتج غير مُخصص للاستخدام من قِبَل الأطفال.
- ينبغي استخدام المنتج وتخزينه بطريقة مناسبة. لا تحاول تفكيك المنتج.
- لا تستخدم المنتج إذا كان الغلاف الخارجي تالفًا.
- يُستخدم الجهاز فقط للأغراض المنصوص عليها والمُوصى بها.
- غير قابل للتعقيم - لا تحاول تعقيم المنتج أو وضعه في جهاز الأوتوكلاف.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان بأيّ من أجزائه آثار تلف؛ فقد يتسبب ذلك في إصابتك ببعض الجروح.
- هذا المنتج مُصمم للاستخدام مرة واحدة.

فرشاة أسنان (B-Care)

٣٢٢٠٠

ماسة سعة ٤ ملم



#PE_

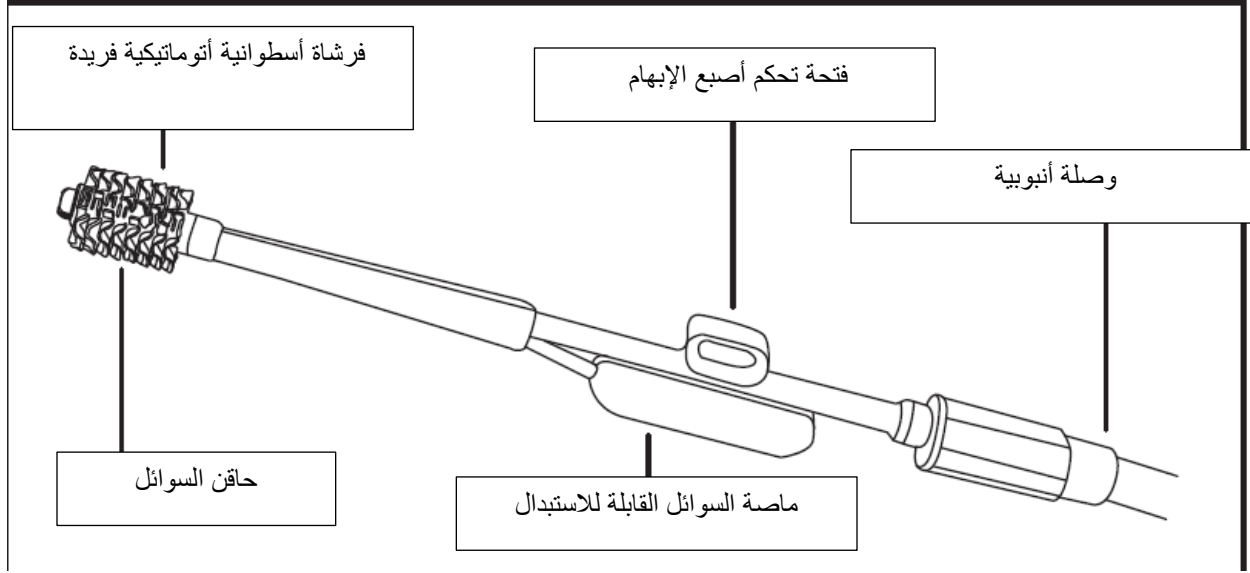


٣- تعليمات تشغيل فرشاة (B-CARE)

٣-١ أدخل الماصة لتحميل السوائل النظيفة [الشكل ١]

٣-٢ وصِّل الماصة بالفرشاة [الشكل ٢]

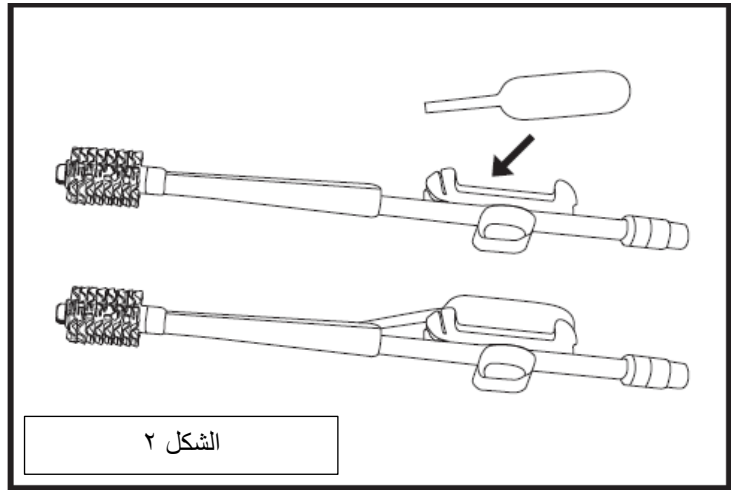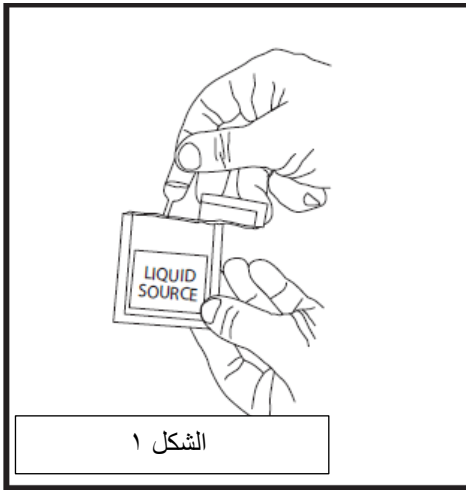

٣-٣ تثبت الفرشاة بوضع الإبهام في فتحة التحكم وأحد الأصابع على الماصة. ووزع السائل عن طريق الضغط برفق على الماصة. [الشكل ٣]

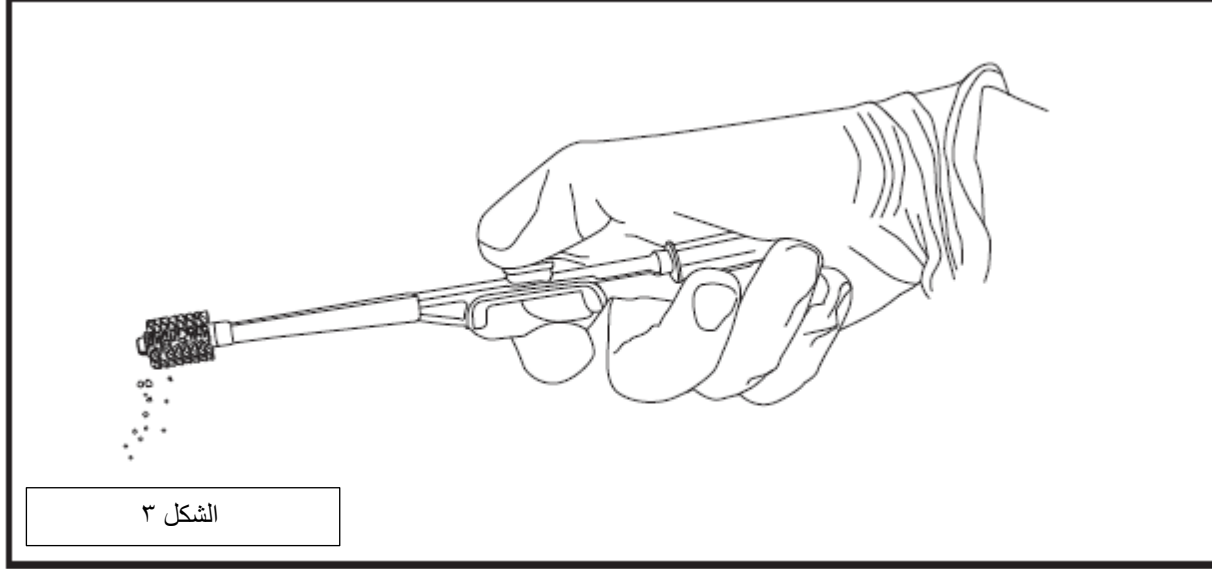

٢- الضمان

هذا المنتج مشمول بضمان مدته عامان بدايةً من تاريخ الشراء. خلال فترة الضمان فإننا نتحمل معالجة أي عيوب في المنتج تكون ناتجة عن عيوب المادة الخام المستخدمة أو أي عيوب في الصناعة سواء بإصلاح المنتج أو باستبداله تمامًا كما تشاء وهذا كله مجانًا.

لا يشمل هذا الضمان: حالات التلف الناتجة عن سوء الاستخدام والبلل الطبيعي الناتج عن الاستخدام وكذلك العيوب ذات التأثير الضعيف على قيمة المنتج أو قدرته على التشغيل. يُلغى هذا الضمان ويُعد كأن لم يكن إذا ما جرت عمليات الإصلاح بمعرفة أشخاص غير مُصرَّح لهم بذلك، وفي حال استخدام قطع غير تابعة لشركة (Biovo Technologies). وللحصول على الخدمات أثناء فترة الضمان سيكون عليك تسليم الجهاز بالكامل أو إرساله مع مندوب المبيعات التابع لك.

الشركة المُصنعة: شركة (Airway Medix S.A)
ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14 ، ٠١ -
٥١٠ وارسو ، بولندا هاتف: +٤٨٢٢٤٠٨٤٤٨٠ |
البريد الإلكتروني: info@airwaymedix.pl
مجمعة ومعبأة في المملكة المتحدة

شركة (Biovo Technologies Ltd) ٢٣ شارع هام العشا
ص.ب ١١٤١٩ بارك افيك ، روش هاعين ، ٤٨٠٩١٧٣ ،
إسرائيل هاتف: ٧٢ ٢١٥١١١٥ (+٩٧٢) |
الفاكس: ٧٢ ٢١٥١١١٢ (+٩٧٢) البريد الإلكتروني :
info@biovo-tech.com

